



ASEPTINET 110

LINGETTES DESINFECTANTES MULTISURFACES

BACTERICIDE • VIRUCIDE • FONGICIDE

- *Conçues pour la désinfection des surfaces et du matériel*
- *Conforme EN14476, EN1276, EN1650 & EN13697*
- *Efficace sur les surfaces lisses et poreuses*
- *Sans pictogramme de sécurité, son emploi est sans danger pour l'utilisateur*
- *Formulées avec des tensioactifs biodégradables, sans EDTA et sans parfum (0 allergène).*
- *Produit conforme contact alimentaire après rinçage*

UTILISATIONS :

Les lingettes ASEPTINET 110 peuvent être utilisées dans :

- l'industrie Agro-Alimentaire, l'industrie des boissons (désinfection des becs des machines d'embouteillage) et dans le domaine de la restauration,
- les industries (pharmaceutiques, aéronautiques, laboratoires...),
- le domaine de la Santé (hôpitaux, cabinets médicaux, maisons de retraites, ...) notamment pour la désinfection du matériel médical, dentaire ou vétérinaire,
- les collectivités (crèches, écoles, cantines, ...).

MODE D'EMPLOI :

Tirer la première lingette centrale. Bien refermer le couvercle après usage.

Grâce à la lingette, déposer le produit sur la surface à désinfecter.

Laisser le produit agir 5min pour une action bactéricide et virucide et 15min pour une action fongicide.

En milieu alimentaire, rincer le produit à l'eau claire.



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : lingettes imprégnées - pH : 11 (+/-0.5) à 20°C - Péréemption : 24 mois

Conditionnées en boîte de 110 Lingettes intissées – Lingettes sans peluchage ou création de poussière

Format lingettes (mm) : 166 * 170 (format M) - Grammage Lingettes : 40 g/m²

Les tensio-actifs composant ce produit respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement européen CE/648/2004 du 31/03/2004 relatif aux détergents.

Préparation Biocides - TP2.TP4 :

TP2 : désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. TP4 : désinfectants des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Matière active : Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium (n° CAS 68424-85-1) à 3 g/kg.

Utiliser les biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Normes d'hygiène et de désinfection :

DESINFECTION	Normes	Souches	Temps Contact
Virucide	EN 14476	Poliovirus type 1 Adenovirus type 5 Murine norovirus	5 min.
Fongicide	EN 1650	Candida albicans	15 min.
	EN 13697	Aspergillus brasiliensis	15 min.
Bactéricide	EN 13697	Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus	5 min.
	EN 1276	Enterococcus hirae Escherichia coli	5 min.

L'ensemble des normes est réalisé en condition de propreté.

Produit contact alimentaire conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12/02/1973 modifié le 19/12/2013).

CONDITIONNEMENT :

Disponible en boîte de 110 Lingettes – Carton de 12 boîtes.

STOCKAGE :

Conserver à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS :

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.